

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΣΤ nCOV2 BOSON Biotech



➤ **Αρνητικό**

Εμφανίζεται η κόκκινη γραμμή στην περιοχή γραμμής ελέγχου “C”. Δεν εμφανίζεται γραμμή στις περιοχές δοκιμής “T”.

Το αρνητικό αποτέλεσμα δείχνει ότι το περιεχόμενο του αντιγόνου SARS-CoV-2 στο δείγμα είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης ή δεν υπάρχει αντιγόνο.

➤ **Θετικό**

Εμφανίζεται η κόκκινη γραμμή στην περιοχή της γραμμής ελέγχου “C” και μια κόκκινη γραμμή στην περιοχή της γραμμής δοκιμής “T”.

Το θετικό αποτέλεσμα δείχνει ότι το περιεχόμενο του αντιγόνου SARS-CoV-2 στο δείγμα είναι υψηλότερο από το όριο ανίχνευσης.

➤ **Άκυρο**

Μόλις δεν εμφανιστεί η κόκκινη γραμμή στην περιοχή της γραμμής ελέγχου “C”, θεωρείται άκυρο.

Το μη έγκυρο αποτέλεσμα δείχνει ότι η διαδικασία δεν είναι σωστή ή ότι η συσκευή τεστ δεν είναι ενημερωμένη ή είναι μη έγκυρη. Σε αυτήν την περίπτωση, οι οδηγίες χρήσεις πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά και να επαναλαμβάνεται το τεστ με μια νέα συσκευή τεστ. Αν το πρόβλημα παραμένει, διακόψτε αμέσως τη χρήση του κιτ τεστ αυτού του αριθμού παρτίδας και επικοινωνήστε μαζί μας.

Σημείωση: Το χρώμα της ταινίας μέτρησης θα ποικίλλει με διαφορετικά δείγματα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το χρώμα της ταινίας μέτρησης, θα πρέπει να κριθεί ως θετικό αποτέλεσμα εντός του καθορισμένου χρόνου ανίχνευσης.

ΕΔΡΑ: Γαλιλαίου 14, 18758 Κερατσίνι, Αττική • Τηλ: +30 210 4004320 Φαξ: +30 210 4001141

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Νυμφαίου 55, 56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη • Τηλ: +30 2310 700110/112 Φαξ: +30 2310 700111

Website: <http://www.atropos.gr/> • **E-mail:** admin@atropos.gr